

開封日

年 月 日

酵素洗浄剤 内視鏡用

ディターザイムS

DETERZYME S

内視鏡用

1L



4 987288 278306

製造
番号
使用
期限

底面に記載



ヨシダ製薬

発売元
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

ディターザイムS

特長

ディターザイムSはたんぱく分解酵素(プロテアーゼ)を含有する内視鏡用の洗浄剤です。

たんぱく分解酵素入りなので、内視鏡等に付着したたんぱく質・有機物を分解します。

短時間で効果があらわれます。

泡立ちのない洗浄剤です。

各種素材に対する腐食性はほとんどありません。

使用方法

調製

内視鏡が完全に浸漬できる容器を用意し、ディターザイムSに水または温水を加えて100倍にします。(水でも有効ですが、温水であればより洗浄力が高まります。)ディターザイムS洗浄液は最低一日一回必ず交換してください。

浸漬

体液、血液、固形物等の汚れをあらかじめ落とし、2~5分間完全に浸漬してください。すべてのチャンネルにディターザイムS洗浄液を満たすようにします。汚れの程度がひどい場合や乾燥固形化している場合は、浸漬時間を延長してください。

すすぎ

浸漬後直ちに水道水、精製水等ですすぎます。内視鏡のチャンネル内は水道水、精製水の吸引・注入を繰り返します。各種洗浄機等にご使用の場合は、それぞれのメーカー指定の方法に従ってご使用ください。

注意

ご使用の際はゴム手袋、眼鏡等の保護具を着用してください。

誤って眼に入った場合には、直ちに多量の水で洗い流し専門医の指示を受けてください。

万一誤飲した場合には、牛乳を飲んで専門医の指示を受けてください。

本製品には消毒・殺菌効果はありません。

殺菌剤、消毒剤、他の洗剤と混合しないように注意してください。

子供の手の届かないところに保管してください。



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PE