

1ステップで除菌&洗浄

品名および仕様

- 環境除菌・洗浄剤 ルビスタ スプレーボトル 500mL用
- 材質 容器：ポリエチレン(PE)、スプレー：ポリプロピレン(PP)および金属、ラベル：ポリプロピレン(PP)
- 容量 540mL
- 取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。廃棄する際は、お住まいの地域の規定に従ってください。

使用方法

本調製ボトルで、パウダー※3 1包(5g)を500mL(500g)の水道水に溶解し、調製液を作製してください。



※3.環境除菌・洗浄剤 ルビスタ パウダー5g/
環境除菌・洗浄剤 ルビスタクリア パウダー5g

環境除菌・洗浄剤

ルビスタ®

Multi-purpose disinfectant cleaner
RUBYSTA

スプレーボトル
500mL用

製造元：キョーリン製薬グループ工場株式会社

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

発売元：杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元：吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5丁目1番地10号

調製液の使用について

【用途】

●よく手が触れる環境表面※1、医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に

※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり等

※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください

【使用上の注意】

●パウダー※3に記載の「使用方法」を厳守し、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

●調製液を使用した後は、スプレーノズル、調製ボトルの内部をよく洗浄してください。

【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004

受付時間 9:00～17:00(月～金 ※土日祝日除く)



スプレー：PE、M
容器：PE
ラベル：PP