

医療機器

2015年1月改訂（第4版）

殺菌消毒薬

インスベン[®]液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

5L

貯法：遮光した気密容器に入れ、室温保存
使用期限：ラベルに記載



人体に使用
しないこと

日本標準商品分類番号	
877324	
承認番号	(15AM)0414
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2003年7月



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

【組成・性状】

- 組成 本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.1gを含む。添加物として、エタノール、亜硝酸ナトリウム、pH調整剤を含む。
- 性状 本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なおいがある。本剤は振ると強く泡立つ。

【効能・効果】

医療機器の殺菌・消毒

【用法・用量】

歯科用小器具の消毒の場合、本剤に10分間浸漬する。高度に汚染された器具の厳密な消毒を行う場合は、あらかじめ2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後本剤中で15分間煮沸する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 人体には使用しないこと。
- 眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症（頻度不明）：接触により発疹、痒痒感等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

3. 臨床検査値への影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿はスルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4. 適用上の注意

(1) 使用時：

- 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。
- 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。

(2) 器具等材質：

- 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル及び錆鉄、マグネシウム、カドミウム、鉛、亜鉛、アルミニウム等を含む製品への使用は避けることが望ましい。
- 皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。

【取扱上の注意】

- 使用中に本剤が変色又は混濁した時は、効果が減弱するので速やかに取り換えることが望ましい。
- 本剤はエタノールを含有するため、煮沸消毒する場合は引火に注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央 5-1-10

医療機器

殺菌消毒薬



インスベン[®]液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

人体に使用
しないこと

調剤

5L



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE

医療機器

2015年1月改訂（第4版）

殺菌消毒薬

インスベン液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

5L

貯法：遮光した気密容器に入れ、室温保存
使用期限：ラベルに記載



人体に使用
しないこと

日本標準商品分類番号	877324
承認番号	(15AM)0414
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2003年7月



製造販売元
ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

【組成・性状】

- 組成 本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.1gを含む。添加物として、エタノール、亜硝酸ナトリウム、pH調整剤を含む。
- 性状 本剤は無色～淡黄色透明の液で、特異なおいがある。本剤は振ると強く泡立つ。

【効能・効果】

医療機器の殺菌・消毒

【用法・用量】

歯科用小器具の消毒の場合、本剤に10分間浸漬する。高度に汚染された器具の厳密な消毒を行う場合は、あらかじめ2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後本剤中で15分間煮沸する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 人体には使用しないこと。
 - 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
 - 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症（頻度不明）：接触により発疹、痒痒感等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

3. 臨床検査値への影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿はスルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4. 適用上の注意

- 使用時：
 - 血清、胆汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。
 - 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。
- 器具等材質：
 - 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル及び錆鉄、マグネシウム、カドミウム、鉛、亜鉛、アルミニウム等を含有する製品への使用は避けることが望ましい。
 - 皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。

【取扱上の注意】

- 使用中に本剤が変色又は混濁した時は、効果が減弱するので速やかに取り換えることが望ましい。
- 本剤はエタノールを含有するため、煮沸消毒する場合は引火に注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央 5-1-10

202008

医療機器

殺菌消毒薬



インスベン液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

人体に使用
しないこと

調剤

5L



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE

医療機器

殺菌消毒薬

インスベン液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

5L



人体に使用
しないこと



製造販売元
ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

医療機器

殺菌消毒薬

インスベン液0.1

亜硝酸ナトリウム添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液

5L



人体に使用
しないこと

医療機器

殺菌消毒薬

インスベン[®]液0.1

製造
番号
使用
期限

販売