

開封日

年 月 日

酵素洗剤 医療機器・器具用

ディターザイム

DETERZYME

1L

ディターザイム



製造
番号
使用
期限

底面に記載



ヨシダ製薬

発売元
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

特長

ディターザイムは非イオン界面活性剤及びたんぱく分解酵素(プロテアーゼ)を含有する医療機器・器具用の洗剤です。たんぱく分解酵素入りなので、器具等に付着したたんぱく質・有機物を分解します。短時間で効果があらわれます。泡切れのよい洗剤です。各種素材に対する腐食性はほとんどありません。

使用方法

調製

医療機器・器具が完全に浸漬できる容器を用意し、ディターザイムに水または温水を加えて100倍にします。(水でも有効ですが、温水であればより洗浄力が高まります。)ディターザイム洗剤液は最低一日一回必ず交換してください。

浸漬

体液、血液、固形物等の汚れをあらかじめ落とし、2~5分間完全に浸漬してください。汚れの程度がひどい場合や乾燥固形化している場合は、浸漬時間を延長してください。

すすぎ

浸漬後直ちに水道水、精製水等ですすぎます。各種洗浄機等にご使用の場合は、それぞれのメーカー指定の方法に従ってご使用ください。

注意

ご使用の際はゴム手袋、眼鏡等の保護具を着用してください。誤って眼に入った場合には、直ちに多量の水で洗い流し専門医の指示を受けてください。万一誤飲した場合には、牛乳を飲んで専門医の指示を受けてください。本製品には消毒・殺菌効果はありません。殺菌剤、消毒剤、他の洗剤と混合しないように注意してください。子供の手の届かないところに保管してください。



キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PE