

# 1ステップで除菌&洗浄

環境除菌・洗浄剤

# ルビスタ®

## パウダー 5g

製造元: キョーリン メディカルサプライ株式会社  
東京都千代田区神田司町二丁目2番11号

発売元: 杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元: 吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5丁目1番地10号

5g×60包

### 「使用方法」に関する注意

- 定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛および軟鋼などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

### 成分

- 酸化剤(ペルオキシソール硫酸水素カリウム)
- 界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
- 添加物: 着色料、香料 ●液性: 酸性

製造番号

使用期限

## 必ず使用前に使用方法と使用上の注意をよく読んでください

### 使用上の注意



小児の手の届くところに保管しない



飲むくすりではありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●本品および調製液を飲み込まないようにしてください。誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けてください。医師の指示がない限り、無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識のない場合には、何も与えないでください。●目に入らないように注意してください。目に入った場合には、速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●本品、調製液を取り扱う際には、ゴム手袋、プラスチック手袋等をご使用ください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。

### 危険



皮膚刺激 / 重篤な眼の損傷 / 水生生物に毒性

### 保管および取扱い上の注意

●本品は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。●清潔な容器を使って調製してください。●使い終わった容器、ワイブ等は、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。

### 【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004

受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)



外箱



袋: PE、金属、PET

### 品名

●環境除菌・洗浄剤 ルビスタ パウダー5g

### 用途

- よく触れる環境表面の除菌・洗浄  
・ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類等  
・トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口等  
・床、手すり等
- 看護・介護用の器具・器材の除菌・洗浄

### 使用方法

●本品1包(5g)に対して水道水500mL(500g)で溶かし、1%(w/v)の調製液を作製してください。調製液はピンク色を呈します。なお、溶けにくい場合は、ぬるま湯をご使用ください。●調製液は、調製後約7日間有効です。溶液が透明になったら新しく調製してください。●調製液は、直射日光を避け、常温で保管してください。●環境清拭用ルビスタワイブに付属のワイブ、あるいは市販の環境清拭用ワイブ等に調製液を浸してご使用ください。ワイブに浸して使用する場合には、含浸ワイブは作製後速やかにご使用ください。

## 1ステップで除菌&洗浄

環境除菌・洗浄剤

# ルビスタ®

## パウダー 5g

製造元: キョーリン メディカルサプライ株式会社  
東京都千代田区神田司町二丁目2番11号

発売元: 杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元: 吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5丁目1番地10号

5g×60包

### 「使用方法」に関する注意

●定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋（ゴム・プラスチック等）を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛および軟鋼などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

### 成分

●酸化剤（ペルオキソー硫酸水素カリウム）  
●界面活性剤（ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）  
●添加物：着色料、香料 ●液性：酸性

製造番号

使用期限

## 1ステップで除菌&洗浄

薬種 EFE 杏林製薬

パウダー 5g

# ルビスタ®

環境除菌・洗浄剤

## 1ステップで除菌&洗浄

薬種 EFE 杏林製薬

5g×60包

### 必ず使用前に使用方法と使用上の注意をよく読んでください

#### 使用上の注意



小児の手の届くところに保管しない



飲むくすりではありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●本品および調製液を飲み込まないようにしてください。誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けてください。医師の指示がない限り、無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識のない場合には、何も与えないでください。●目に入らないように注意してください。目に入った場合には、速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●本品、調製液を取り扱う際には、ゴム手袋、プラスチック手袋等をご使用ください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。

#### 危険



皮膚刺激／重篤な眼の損傷／水生生物に毒性

#### 保管および取扱い上の注意

●本品は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。●清潔な容器を使って調製してください。●使い終わった容器、ワイブ等は、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。

### 【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004

受付時間 9:00～17:00(月～金 ※土日祝日除く)



4

987288 941026



紙



袋:PE,金属,PET

16vr11

### 品名

●環境除菌・洗浄剤 ルビスタ パウダー5g

### 用途

●よく触れる環境表面の除菌・洗浄  
・ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類 等  
・トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口 等  
・床、手すり 等  
●看護・介護用の器具・器材の除菌・洗浄

### 使用方法

●本品1包(5g)に対して水道水500mL(500g)で溶かし、1%(w/v)の調製液を作製してください。調製液はピンク色を呈します。なお、溶けにくい場合は、ぬるま湯をご使用ください。●調製液は、調製後約7日間有効です。溶液が透明になったら新しく調製してください。●調製液は、直射日光を避け、常温で保管してください。●環境清拭用 ルビスタワイブに付属のワイブ、あるいは市販の環境清拭用ワイブ等に調製液を浸してご使用ください。ワイブに浸して使用する場合には、含浸ワイブは作製後速やかにご使用ください。

【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004

受付時間 9:00～17:00(月～金 ※土日祝日除く)

製造元: キョーリン メディカルサブライ株式会社

発売元: 杏林製薬株式会社

販売元: 吉田製薬株式会社

↑  
どこからでも開封できます  
↓

環境除菌・洗浄剤

ルピスタ®

パウダー 5g

成分

- 酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム)
- 界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
- 添加物: 着色料、香料 ●液性: 酸性

 ヨシダ製薬

 注意: 飲めません

製造番号  
使用期限



 注意:  
飲めません